


PraenaTest® Verpackungsanleitung

Inhalt

Blutentnahmeröhrchen und Verpackungsmaterial zur Anwendung des PraenaTest® für eine Patientin:

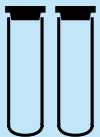

2 Blutentnahmeröhrchen
(Cell-Free DNA BCT®CE)



4 Barcode-Aufkleber




1 absorbierende
Halterung




1 flüssigkeitsdichter
Schutzbeutel



1 Kühlpad
(im Kühlschrank lagern;
nicht einfrieren)

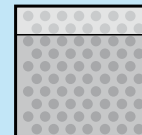


1 alubeschichtete
Isoliertasche

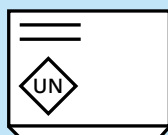

1 Rücksendebox für
Blutproben und Dokumente

Wie werden die befüllten Blutentnahmeröhrchen verpackt und versendet?

1

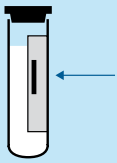

Nachdem Sie das Blut gemäß der Gebrauchsanweisung der Streck Cell-Free DNA BCT® CE entnommen haben, achten Sie bitte darauf, dass die befüllten Blutentnahmeröhrchen 10 Mal invertiert wurden, um das Blut mit dem Reagenz zu vermischen.


Für die Blutentnahme verwenden Sie bitte ein geeignetes Vakuumabnahmesystem.

Empfehlung: BD Vacutainer Safety-Lok Blutentnahmesystem 21G grün (BD Artikel-Nr. 367282), BD Kanülenhalter für Vacutainer (BD Artikel-Nr. 364815)

Verwenden Sie keine Blutentnahmeröhrchen, bei denen das Verfallsdatum überschritten ist.


Weitere Informationen finden Sie unter www.streck.com

4

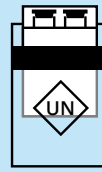


Legen Sie die absorbierende Halterung mit den Blutentnahmeröhrchen in den flüssigkeitsdichten Schutzbeutel. Verschließen Sie den Schutzbeutel gemäß dem aufgedruckten Verwendungshinweis.

5

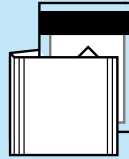


Umschließen Sie den flüssigkeitsdichten Schutzbeutel inkl. der befüllten Blutröhrchen mit dem Kühlpad.

6

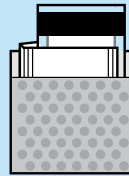

Verpacken Sie die so gekühlten Blutproben und das Kühlpad in die alubeschichtete Isoliertasche.

2

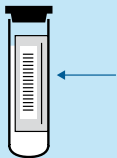

Beschriften Sie die Etiketten beider Blutentnahmeröhrchen jeweils mit dem Vornamen, Nachnamen und dem Geburtsdatum der Patientin. Kleben Sie jeweils einen Barcode auf die Blutentnahmeröhrchen. Der Barcode muss gut sichtbar sein, da der Auftrag ansonsten nicht bearbeitet werden kann.


Nicht benötigte Barcodes können für Ihre eigene Dokumentation verwendet werden.

7




Füllen Sie das PraenaTest®-Anforderungsformular aus (erhalten Sie separat). Kleben Sie einen Barcode auf das Original.

3

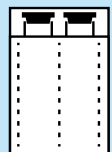

Schieben Sie die Blutentnahmeröhrchen in die Laschen der absorbierenden Halterung.

8

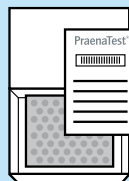

Legen Sie die verpackten Blutproben mit dem vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Original des Anforderungsformulars in die Rücksendebox.

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da!

Sie haben keine Anforderungsformulare in Ihrer Praxis?

Das Anforderungsformular finden Sie auch in unserem Download Center unter www.lifecodexx.com/fuer-aerzte/download-center oder rufen Sie uns an. Telefon +49 (0) 7531 9769460