

PraenaTest® Verpackungsanleitung

Inhalt

Blutentnahmeröhrchen und Verpackungsmaterial zur Anwendung des PraenaTest® für eine Patientin:



2 Blutentnahmeröhrchen (LBgard® Blutröhrchen)

Beachten Sie das Verfallsdatum auf den Blutentnahmeröhrchen.
Ist das Verfallsdatum überschritten, kann keine Analyse erfolgen.



4 Barcode-Aufkleber




1 absorbierende Halterung




1 flüssigkeitsdichter
Schutzbeutel



1 Kühlpad
(im Kühlschrank lagern; nicht einfrieren)

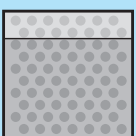

1 alubeschichtete
Isoliertasche

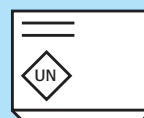

1 Rücksendebox für
Blutproben und Dokumente

PraenaTest®

Wie werden die befüllten Blutentnahmeröhrchen verpackt und versendet?

1



Nachdem Sie das Blut gemäß der Gebrauchsanweisung der Biomatrix LBgard® Blutröhrchen entnommen haben, achten Sie bitte darauf, dass die befüllten Blutentnahmeröhrchen 10 Mal invertiert wurden, um das Blut mit dem Reagenz zu vermischen.

Inadäquates oder verzögertes Mischen kann zu falschen Analyseergebnissen bzw. schlechter Produktleistung führen.

Für die Blutentnahme verwenden Sie bitte ein geeignetes Vakuumabnahmesystem.

Empfehlung: BD Vacutainer Safety-Lok Blutentnahmesystem 21G grün (BD Artikel-Nr. 367282), BD Kanülenhalter für Vacutainer (BD Artikel-Nr. 364815)



Verwenden Sie keine Blutentnahmeröhrchen, bei denen das Verfallsdatum überschritten ist.

Weitere Informationen finden Sie unter www.biomatrix.com




4



Legen Sie die absorbierende Halterung mit den Blutentnahmeröhrchen in den flüssigkeitsdichten Schutzbeutel. Verschließen Sie den Schutzbeutel gemäß dem aufgedruckten Verwendungshinweis.

5

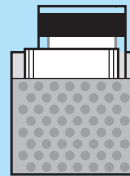


Verpacken Sie die Blutproben zusammen mit dem Kühlpad in die alubeschichtete Isoliertasche.

6




Füllen Sie das PraenaTest®-Anforderungsformular aus (erhalten Sie separat). Kleben Sie einen Barcode auf das Original.

3

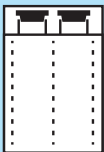

Schieben Sie die Blutentnahmeröhrchen in die Laschen der absorbierenden Halterung.

7

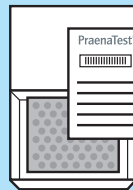

Legen Sie die verpackten Blutproben mit dem vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Original des Anforderungsformulars in die Rücksendebox.

Was ist sonst noch wichtig?

Die Blutentnahmeröhrchen dieses Sets sind CE-markiert (LBgard® Blutröhrchen). Die vollständige Gebrauchsanleitung der Firma Biomatrix finden Sie unter:

www.lifecodexx.com/fuer-aerzte/download-center